


# ARTHROSOFT

orthopädische Einlegesohle

1

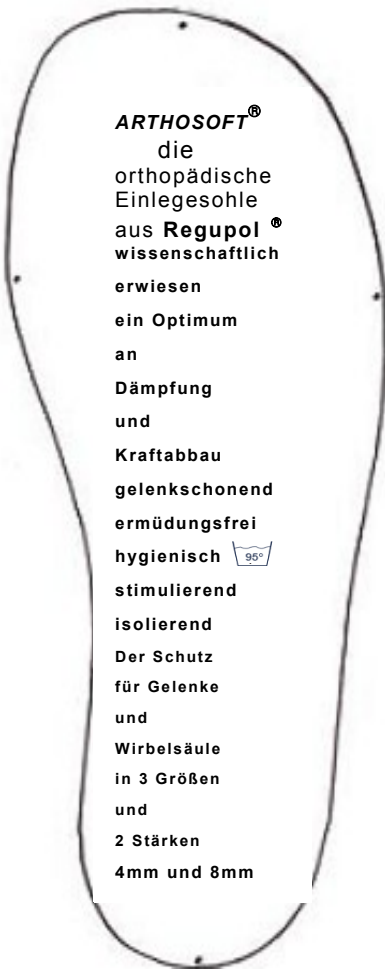

schmerzfrei gehen und stehen

# ARTHROSOFT

# ARTHROSOFT

orthopädische Einlegesohle

2

Die **ARTHROSOFT®** - Einlegesohle aus **Regupol®** ist ein Spitzenprodukt der Forschung in Sportwissenschaft und Sportmedizin !

16. August 2009, Berlin - Olympiastadion,



Leichtathletik Weltmeisterschaft Finale 100m Männer,



die Sportwelt hält den Atem an:

Der Jamaikaner Usain Bolt läuft einen neuen sensationellen Weltrekord über 100m in 9,72 Sekunden



2 Tage später im Finale 200m Männer:

Usain Bolt läuft die 200m in unvorstellbarer neuer Welt-Bestzeit von 19,19 Sekunden. Unfassbar aber erklärbar !

Das Geheimnis dieser einzigartigen Leistung beruht auch auf hightec made in Germany: Die neue blaue Laufbahn im Olympia Stadion Berlin aus der schwarzen Elastikschiicht **Regupol®**



Weltweit eingebaut in Laufbahnen für professionelle Wettkämpfe, in Sporthallenböden und Sportplätzen ermöglicht **Regupol®** unerreichte Spitzenleistungen und schützt kompromisslos und ermüdungsfrei die Gesundheit der Athleten. Zum Schutz von Muskeln, Sehnen und Gelenken und Bandscheiben garantiert Regupol einzigartige Werte an Dämpfung und Kraftabbau in Verbindung mit Stabilität über unendlich viele Belastungszyklen.

Usain Bolt, begeistert vom Berliner "Blauen Wunder", lässt sich zuhause für das Training eine Regupol® Laufbahn bauen.

Nutzen Sie dieses Material für Ihre Gesundheit !

**Die ARTHROSOFT® Einlegesohle im Schuh  
auf Schritt und Tritt permanenter Schutz**

schmerzfrei gehen und stehen

# ARTHROSOFT

# ARTHROSOFT

orthopädische Einlegesohle

3

**Regupol**® - Sportmedizinisch erforscht

Die ARTHROSOFT® Einlegesohle aus **Regupol**® mit 4mm oder 8mm, in Kombination mit bis zu 12mm Stärke eröffnet völlig neue Möglichkeiten in Prophylaxe und Therapie bei Erkrankungen des Bewegungsapparates. Der Indikationsbereich umfasst alle Gelenke des Fußes-, das Knie, die Hüfte und vor allem die Wirbelsäule.

Wissenschaftliche Studien belegen bei vielen Patienten, die in ihren gewohnten Schuhen mit ARTHROSOFT® Einlegesohlen aus **Regupol**® versorgt werden, nachweislich beste Ergebnisse:

## Indikationen Entlastung und Schutz durch Dämpfung und Kraftabbau

### Gelenke und Bandapparat des Fußes



bei Senk-Spreizfuß, Arthrosen der Fußgelenke, Fersensporn, Schmerzen der Fußsohle

### Knie- und Hüftgelenk



Hüftdysplasie, Arthrose des Hüftgelenkes, Kniegelenksarthrose, Kreuzband- Meniskusbeschwerden

### Wirbelsäule



Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule  
Spondylarthrose  
Verschleiß der Wirbelgelenke  
Osteoporose der Wirbelsäule  
Bandscheibenvorfall

schmerzfrei gehen und stehen

# ARTHROSOFT


# ARTHROSOFT

orthopädische Einlegesohle

4

## Bedienungsanleitung zum Einpassen in den Schuh

Die Sohle muss in der Regel nur im Bereich der Ferse mit einer stabilen Haushaltsschere gekürzt werden.

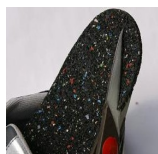

Sohle vollständig in den Schuh einschieben, Überstand am Fersenteil aufstehen lassen und die Länge des Überstands abschätzen und ggf. markieren.	Sohle zum Teil wieder herausziehen, dann den Überstand des Fersenteils mit einer stabiler Schere halbmondförmig abschneiden	Zugeschnittene Sohle wieder in den Schuh zurückschieben und fertig einpassen.- Falls nötig nochmals nachschneiden.
--	---	--

### Lieferformen jeweils 2 Stück für links und rechts

**ARTHROSOFT®** Einlegesohlen 4mm    **Propylaxesohle**    **€32,90**

Größe 1 für Schuhgröße 32-38 Art-Nr. 4110-401

Größe 1 für Schuhgröße 38-42 Art-Nr. 4110-402

Größe 1 für Schuhgröße 42-48 Art-Nr. 4110-403

**ARTHROSOFT®** Einlegesohlen 8mm    **Therapiesohle**    **€35,90**

Größe 1 für Schuhgröße 32-38 Art-Nr. 8110-801

Größe 1 für Schuhgröße 38-42 Art-Nr. 8118-802

Größe 1 für Schuhgröße 32-48 Art-Nr. 8118-803

**ARTHROSOFT®** Einlegesohlen  
**Herstellung und Vertrieb**

**DV Vertriebs GmbH**

Flurstraße 15 -17

D-86465 Heretsried

fon (+49) 08293 900- 45

fax (+49) 08293 900- 45

info@arthosoft.de

www.arthosoft.eu

schmerzfrei gehen und stehen

# ARTHROSOFT